



Manual do Usuário

ELETRO COAGULADOR- RESSECTOR MULTIPOLAR DESCARTAVEL URO-PLUS LANG

REV. 00

Fabricante

LANG ELETRO MEDICINA LTDA ME
Rua Joaquim Vieira Filho, 562
Japuiba – Cachoeiras de Macacu / RJ
CEP: 28.685-000 – Rio de Janeiro/RJ
Fone: (21) 2745-6307 – www.lang.com.br
Registro ANVISA: 80123900066
Responsável Técnica: CRISTINA DA COSTA AMORIM
CRQ/RJ: 3211275


Nome do produto

ELETRO COAGULADOR-RESSECTOR MULTIPOLAR DESCARTAVEL URO-PLUS LANG

Modelos comerciais

- Eletro Coagulador-Ressector – KNIFE – Código: 7-8300032347
- Eletro Coagulador-Ressector – Coagulation Ball – Código: 7-8300032348
- Eletro Coagulador-Ressector – Coagulation Roller – Código: 7-8300032349
- Eletro Coagulador-Ressector – Loop 90° - Código:7-8300032351
- Eletro Coagulador-Ressector – Loop – Código: 7-8300032350

Imagens do produto

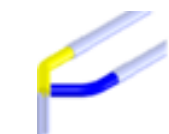

Eletro Coagulador-Ressector – KNIFE




Eletro Coagulador-Ressector – Coagulation Ball



Eletro Coagulador-Ressector – Coagulation Roller



Eletro Coagulador-Ressector – Loop 90°

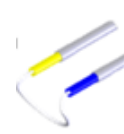

Eletro Coagulador-Ressector – Loop

Descrição

O ELETRO COAGULADOR-RESSECTOR MULTIPOLAR URO-PLUS LANG, feito com material de alta resistência, aço 420/Nylon 10 e revestida com tungstênio no sistema Non Stick.

O ELETRO COAGULADOR-RESSECTOR BIPOLAR URO-PLUS LANG é compatível com elementos de trabalhos distintos é produzido com alta tecnologia. Sistema de engate rápido.

Uso pretendido

O ELETRO COAGULADOR-RESSECTOR MULTIPOLAR URO-PLUS LANG, é indicado para corte, cauterização, coagulação, ressecção de tecido durante procedimentos de cirurgia endoscópica e urológica.

Princípio

A tecnologia de transferência de calor utilizada nas ponteiros das pinças e eletrodos foi concebida para eliminar a aderência das ponteiros ao tecido. Isso ocorre devido à rapidez da dissipação do calor gerado durante a coagulação. O calor é transferido de maneira rápida, resfriando rapidamente as ponteiros evitando a aderência do tecido nas mesmas. Isso torna a cirurgia mais rápida, pois não há a necessidade de se limpar constantemente as ponteiros, além de ser mais segura, pois após a selagem o cirurgião pode retirar a pinça sem se preocupar que o tecido fique aderido à ponteira com o movimento de retirada da mesma rompendo o vaso já selado.

Compatibilidade com geradores eletrocirúrgicos

O ELETRO COAGULADOR-RESSECTOR MULTIPOLAR URO-PLUS LANG foi concebido para ser utilizado em geradores eletrocirúrgicos com entrada bipolar, especialmente para os geradores Lang, porém, podem ser utilizados por outros geradores que estejam devidamente registrados na ANVISA, como por exemplo, as seguintes marcas: VALLEYLAB, ELMED, MARTIN, WEN, desde que os mesmos possuam as seguintes características técnicas:

- Serem geradores com a função bipolar;
- Possuírem conexão bipolar, e;
- Não ultrapassarem os limites de potência especificados abaixo:
 - Não utilize o ELETRO COAGULADOR-RESSECTOR MULTIPOLAR URO-PLUS LANG com definições de potência do gerador de tensão que excedam tensão RF pico-a-pico de 800 V.
 - Os valores máximos de potência permitidos são os seguintes:
 - Função RTU (Ressecção Transuretral da Próstata)
 - Coagulação: 10 Watts
 - Corte: 10 Watts

Instruções de utilização



ATENÇÃO: Certifique-se que o gerador está desligado (ou está em modo de espera) antes de conectar o produto. Não forneça energia ao produto durante a montagem, caso contrário poderá ocorrer lesões no utilizador.



ATENÇÃO: Manuseie a extremidade de trabalho das ponteiros com cuidado, pois a mesma pode ser facilmente danificada

1. Retire o material esteril.
2. Conecte o eletro coagulador-ressector a unidade de elemento de trabalho.
3. Conecte o elemento de trabalho ao gerador.
4. Ajuste de acordo com o procedimento a potência correta para utilização do material.
5. Inicie o procedimento.

Descarte

Descarte as pontas de acordo com as diretivas hospitalares relativas a materiais afiados com potenciais riscos biológicos.

Precauções

Inspecione cuidadosamente a embalagem esterilizada das pontas; não utilize caso:

- A embalagem e/ou o selo estejam danificados;
- Os componentes pareçam estar danificados;
- O prazo de validade tenha expirado;
- O ELETRO COAGULADOR-RESSECTOR MULTIPOLAR URO-PLUS LANG – NÃO RE-ESTERILIZAR.
- A reesterilização do ELETRO COAGULADOR-RESSECTOR MULTIPOLAR URO-PLUS LANG por qualquer método poderá causar falhas de funcionamento, que podem provocar lesões no paciente. Não utilize o ELETRO COAGULADOR-RESSECTOR MULTIPOLAR URO-PLUS LANG caso tenham sido reesterilizadas por qualquer método.
- Utilize uma técnica asséptica durante todas as fases de manuseio do produto.
- Sempre consulte o manual do usuário para determinar os valores máximos de potência permitidos.
- Prazo de validade do ELETRO COAGULADOR-RESSECTOR MULTIPOLAR URO-PLUS LANG:
 - 2 anos após a data de esterilização informada no rótulo da embalagem.

Observação

A LANG não se responsabiliza por qualquer produto que tenha sido reesterilizado, nem serão aceitos para crédito ou troca quaisquer produtos que tenham sido abertos, ainda que não utilizados.

Armazenamento e transporte

O instrumental cirúrgico deve ser armazenado de forma a manter sua configuração, seu acabamento de superfície e não danificar sua embalagem. Na estocagem o instrumental deve atender às seguintes exigências: o instrumental deve estar em sua embalagem original; deve ser armazenado em local seco e longe da umidade e do calor direto (temperatura entre 20 e 25°C e umidade relativa do ar entre 30 e 50 %) e não deve ser estocada junto com produtos químicos que possam desprender vapores corrosivos.

O transporte e manuseio devem ser realizados de forma a impedir dano ou alteração nas suas características. Deve-se manipular o instrumental cirúrgico cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou quedas.

Atendimento ao cliente

No caso de algum defeito, o usuário do produto médico poderá entrar em contato com o Atendimento ao Cliente no local relacionado abaixo:

INFORMAÇÕES PARA CONTATO:

Atendimento ao Cliente autorizada do produto médico no território nacional Lang Eletro Medicina Ltda – Brasil

- Telefone: (21) 2745 6307

Garantia do Produto

Lang Eletro Medicina Ltda. - EPP, garante aos seus clientes usuários originais, que os equipamentos de sua fabricação são produzidos dentro da mais avançada técnica e com rigoroso controle de qualidade, assegurando dentro das condições e prazos abaixo, um perfeito funcionamento dos mesmos.

1. DOS EQUIPAMENTOS

1.1 Esta garantia é válida para todos os equipamentos da marca LANG®.

2. DA INSTALAÇÃO E DO USO

2.1 A instalação e/ou operação dos equipamentos, bem como, as condições de trabalho, devem atender às especificações da LANG® constantes nas Instruções de Uso. Diferentes condições das indicadas invalidam as cláusulas de Garantia deste Termo.

3. DA GARANTIA

3.1 A garantia, sem qualquer ônus ao usuário adquirente, é limitada à substituição e/ou conserto de eventuais peças defeituosas ou à correção de qualquer defeito de produção, mediante constatação do nosso Departamento de Assistência Técnica.

3.2 A substituição e/ou conserto referido no item anterior não se aplica às peças com desgaste natural de uso, bem como, por imperícias ou negligências na utilização do equipamento, ou ainda, que tenham sido consertadas ou modificadas por pessoas não credenciadas pela LANG®.

3.3 Em nenhuma hipótese, caso ocorra à necessidade de substituição de qualquer componente coberto por este Termo, o período de garantia original será dilatado pelo acréscimo de eventuais suplementares do componente substituído.

4. DO LOCAL DA GARANTIA

4.1 O reparo e/ou substituição de peças será realizado por técnico da LANG®, ou credenciado pela mesma.

4.2 Quando constatado que um perfeito reparo do equipamento só será possível em nossas instalações (fábrica), ou nas empresas por nós autorizadas, o frete do transporte (ida e volta) correrá por conta do adquirente usuário.

5. DOS PRAZOS

5.1 Inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal de venda da LANG® ou seus revendedores, pelo prazo de 12 meses.

6. DA RESPONSABILIDADE

6.1 Esta garantia é válida somente para o equipamento que estiver em uso e na posse do adquirente usuário original

6.2 A responsabilidade da LANG® é limitada à substituição e/ou reparo dos componentes, excetuando-se da garantia eventuais prejuízos por lucros cessantes ou pela indenização de quaisquer outros danos indiretos ou imediatos.

NOTA: A presente garantia só é válida juntamente com a Nota Fiscal

Termo de responsabilidade

A empresa Lang Eletro Medicina Ltda. - ME, representada por seu Responsável Técnico Cristina da Costa Amorim e por seu Representante Legal Claudia Hernandez Martin Lang, assumem a responsabilidade técnica e legal pelo produto e que toda a informação prestada referente ao produto ELETRO COAGULADOR-RESSECTOR MULTIPOLAR URO-PLUS LANG, contidas nestas Instruções de Uso, são verdadeiras.