

INSTRUÇÕES DE USO

LANG
eletro

Equipamento:

PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL NON STICK
TRANSFEINODAL ENDOSEAL LANG

REV
01

INSTRUÇÕES DE USO

(MANUAL DO EQUIPAMENTO)

PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL TRANSFEINODAL ENDOSEAL LANG ®, desenvolvida dentro da mais alta tecnologia disponível no mercado, projetada para proporcionar o máximo de rendimento, qualidade e segurança.

Obrigado por escolher um produto LANG.



ATENÇÃO:

Para maior segurança:





Leia e entenda todas as instruções contidas nesta "Instruções de Uso" antes de instalar ou operar este produto.

Nota: Este manual deve ser lido por todos os operadores deste produto.

INFORMAÇÕES GERAIS

Atenção!

Este manual (Instruções de Uso) deverá ser lido e compreendido por todos os usuários do equipamento. Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Departamento de Atendimento ao Cliente da LANG pelo telefone +55 (21) 2745 6307

1. IDENTIFICAÇÃO		
Nome técnico:	PINÇA BIPOLAR	
Nome comercial:	PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL NON STICK TRANSFENOIDAL ENDOSEAL LANG	
Modelos:	 70-010-00	 70-010-01
	 70-011-00	 71-010-01
	<ul style="list-style-type: none">➤ 70-010-00 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL NON STICK TRANSFENOIDAL ENDOSEAL LANG - RETA COM CABO➤ 70-011-00 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL NON STICK TRANSFENOIDAL ENDOSEAL LANG - RETA COM CABO – COM ASPIRAÇÃO➤ 70-010-01 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL NON STICK TRANSFENOIDAL ENDOSEAL LANG - ANGULADA COM CABO➤ 70-011-01 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL NON STICK TRANSFENOIDAL ENDOSEAL LANG - ANGULADA COM CABO – COM ASPIRAÇÃO	
	Marca:	Lang Eletro Medicina Ltda. - ME
Responsável Técnico:	Cristina da Costa Amorim	
Registro ANVISA	-----	

2. FABRICANTE	
Razão Social	Lang Eletro Medicina Ltda. - ME
CNPJ	31.600471/0001-64
Fone / Fax	+55 (21) 2745 6307 / +55 (21) 3539-0660
Endereço Fábrica	Rua: Joaquim Vieira Filho, 562 – Japuíba 2º Distrito de Cachoeiras de Macacu, Estado do Rio de Janeiro CEP: 28685-000
Website	www.lang.com.br

3. INDICAÇÕES

As pinças LANG, feitas com material de alta resistência, aço 420 e revestido com nylon 10 e o cabo em ABS injetado. São indicadas para cauterização, coagulação, apreensão, manipulação de tecido durante procedimentos de neurocirurgia e cirurgia otorrinolaringológica.

As pinças LANG possuem sistema de aspiração de fumaça que é liberado durante procedimento cirúrgico, para a aspiração as pinças deverão ser conectadas ao sistema de aspiração do centro cirúrgico.

4. PRECAUÇÕES

Inspecione cuidadosamente a embalagem esterilizada das pontas; não utilize caso:

- A embalagem e/ou o selo estejam danificados;
- Os componentes pareçam estar danificados;
- O prazo de validade tenha expirado;

5. AS PINÇAS SÃO DE USO ÚNICO – NÃO REUTILIZE.

A reesterilização das pinças por qualquer método poderá causar falhas de funcionamento, que podem provocar lesões no paciente.

Não as utilize caso tenham sido reesterilizadas por qualquer método.

- Utilize uma técnica asséptica durante todas as fases de manuseio do produto

6. ESTERILIZAÇÃO

Este produto destina-se a UMA ÚNICA UTILIZAÇÃO; NÃO REESTERILIZE.

A LANG não se responsabiliza por qualquer produto que tenha sido reesterilizado, nem serão aceitos para crédito ou troca quaisquer produtos que tenham sido abertos, ainda que não utilizados.

- Esterilizado em Oxido de Etileno

7. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ATENÇÃO: Manuseie a pinça com cuidado, pois as mesmas são flexíveis e podem se danificar. Tenha cuidado, para que não danifique ou que haja rompimento do cabo.

ATENÇÃO: Certifique-se de que o gerador está desligado (ou está em modo de espera) antes conectar as pinças. Não forneça energia à pinça durante a montagem, caso contrário poderá ocorrer lesões no utilizador.

1. Retire a pinça esterilizada. Deixe o tubo de proteção nas pontas para proteger as mãos e as luvas.
2. Retire o tubo de proteção da ponta.
3. Feche a pinça e verifique o alinhamento da ponta
4. Aperte o gatilho da lâmina de corte e verifique que a mesma esteja correndo livremente.
5. Conecte a pinça ao cabo
6. Conecte o cabo ao gerador.

NOTA:

Os valores máximos de potência permitidos são os seguintes:

Corte: 80W

Coagulação: 60W

A família de canetas para PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL NON STICK TRANSFEINODAL ENDOSEAL LANG foi desenvolvida para a perfeita compatibilidade com a unidade família de Bisturi Eletrônico LBS da LANG ELETRO MEDICINA, registrado junto à ANVISA sob nº 80123900040.

O uso das PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL NON STICK TRANSFEINODAL ENDOSEAL LANG com outros equipamentos não compatíveis pode comprometer sua funcionalidade. Consulte sempre o serviço de atendimento LANG para orientação específica.

Para o uso dos modelos de PINÇA com aspiração, deve-se conectar a aspiração do centro cirúrgico a PINÇA.

8. DESCARTE

Descarte a cânula de acordo com as diretrizes hospitalares relativas a materiais afiados com potenciais riscos biológicos.

9. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O instrumental cirúrgico deve ser armazenado de forma a manter sua configuração, seu acabamento de superfície e não danificar sua embalagem. Na estocagem o instrumental deve atender às seguintes exigências: o instrumental estéril deve estar em sua embalagem original; deve ser armazenado em local seco e longe da umidade e do calor direto (temperatura entre 20 e 25 C e umidade relativa do ar entre 30 e 50 %) e não deve ser estocada junto com produtos químicos que possam desprender vapores corrosivos. O transporte e manuseio devem ser realizados de forma a impedir dano ou alteração nas suas características. Deve-se manipular o instrumental cirúrgico cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou quedas.

10. GARANTIA DO EQUIPAMENTO

A **Lang Eletro Medicina Ltda. - ME**, garante aos seus clientes usuários originais, que os equipamentos de sua fabricação são produzidos dentro da mais avançada técnica e com rigoroso controle de qualidade, assegurando dentro das condições e prazos abaixo, um perfeito funcionamento dos mesmos.

1. DOS EQUIPAMENTOS

1.1 Esta garantia é válida para todos os equipamentos da marca LANG®.

2. DA INSTALAÇÃO E DO USO

2.1 A instalação e/ou operação dos equipamentos, bem como, as condições de trabalho, devem atender às especificações da LANG® constantes nas Instruções de Uso. Diferentes condições das indicadas invalidam as cláusulas de Garantia deste Termo.

3. DA GARANTIA

3.1 A garantia, sem qualquer ônus ao usuário adquirente, é limitada à substituição e/ou conserto de eventuais peças defeituosas ou à correção de qualquer defeito de produção, mediante constatação do nosso Departamento de Assistência Técnica.

3.2 A substituição e/ou conserto referido no item anterior não se aplica às peças com desgaste natural de uso, bem como, por imperícias ou negligências na utilização do equipamento, ou ainda, que tenham sido consertadas ou modificadas por pessoas não credenciadas pela LANG®.

3.3 Em nenhuma hipótese, caso ocorra à necessidade de substituição de qualquer componente coberto por este Termo, o período de garantia original será dilatado pelo acréscimo de eventuais suplementares do componente substituído.

4. DO LOCAL DA GARANTIA

4.1 O reparo e/ou substituição de peças será realizado por técnico da LANG®, ou credenciado pela mesma.

4.2 Quando constatado que um perfeito reparo do equipamento só será possível em nossas instalações (fábrica), ou nas empresas por nós autorizadas, o frete do transporte (ida e volta) correrá por conta do adquirente usuário.

5. DOS PRAZOS

5.1 Inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal de venda da LANG® ou seus revendedores, pelo prazo de 12 meses.

6. DA RESPONSABILIDADE

6.1 Esta garantia é válida somente para o equipamento que estiver em uso e na posse do adquirente usuário original

6.2 A responsabilidade da LANG® é limitada à substituição e/ou reparo dos componentes, excetuando-se da garantia eventuais prejuízos por lucros cessantes ou pela indenização de quaisquer outros danos indiretos ou imediatos.

OBS.: A presente garantia só é válida juntamente com a Nota Fiscal

11. TERMO DE RESPONSABILIDADE

A empresa **Lang Eletro Medicina Ltda. - ME**, representada por seu Responsável Técnico Cristina da Costa Amorim e por seu Representante Legal Thais Lang Arruda Rodrigues, assumem a responsabilidade técnica e legal pelo produto e que toda a informação prestada referente ao produto PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL NON STICK TRANSFEINODAL ENDOSEAL LANG®, contidas nestas Instruções de Uso, são verdadeiras.