

INSTRUÇÕES DE USO

LANG
eletro

Equipamento:

PINÇA DESCARTÁVEL
BIPOLAR LANG

REV
01

INSTRUÇÕES DE USO

(MANUAL DO EQUIPAMENTO)

PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um PINÇA DESCARTÁVEL BIPOLAR LANG®, desenvolvida dentro da mais alta tecnologia disponível no mercado, projetada para proporcionar o máximo de rendimento, qualidade e segurança. Obrigado por escolher um produto LANG.



ATENÇÃO:

Para maior segurança:

Leia e entenda todas as instruções contidas nesta “Instruções de Uso” antes de instalar ou operar este produto.

Nota: Este manual deve ser lido por todos os operadores deste produto.

INFORMAÇÕES GERAIS

Atenção!

Este manual (Instruções de Uso) deverá ser lido e compreendido por todos os usuários do equipamento. Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Departamento de Atendimento ao Cliente da LANG pelo telefone +55 (21) 2745 6307

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome técnico:	PINÇA BIPOLAR
Nome comercial:	PINÇA DESCARTÁVEL BIPOLAR LANG
Marca:	Lang Eletro Medicina Ltda. - ME
Responsável Técnico:	Cristina da Costa Amorim
Registro ANVISA	80123900035

MODELOS

Pinça Descartável Bipolar Lang – Plug Universal



Código	Descrição	Tamanho		Característica
		Diâmetro Ø	Comprimento	
70-405-160NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL BAIONETA NON-STICK ULTRASEAL PT 0,5MM	0,5 mm	160 mm	COM CABO
70-405-180NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL BAIONETA NON-STICK ULTRASEAL PT 0,5MM	0,5 mm	180 mm	COM CABO
70-405-210NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL BAIONETA NON-STICK ULTRASEAL PT 0,5MM	0,5 mm	210 mm	COM CABO
70-405-230NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL BAIONETA NON-STICK ULTRASEAL PT 0,5MM	0,5 mm	230 mm	COM CABO
70-407-160NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL BAIONETA NON-STICK ULTRA POINT PT 0,7MM	0,7 mm	160 mm	COM CABO
70-407-180NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL BAIONETA NON-STICK ULTRASEAL PT 0,7MM	0,7 mm	180 mm	COM CABO
70-407-210NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL BAIONETA NON-STICK ULTRASEAL PT 0,7MM	0,7 mm	210 mm	COM CABO
70-407-230NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL BAIONETA NON-STICK ULTRASEAL PT 0,7MM	0,7 mm	230 mm	COM CABO
70-410-160NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL BAIONETA NON-STICK ULTRASEAL PT 1,0MM	1,00 mm	160 mm	COM CABO
70-410-180NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL BAIONETA NON-STICK ULTRASEAL PT 1,0MM	1,00 mm	180 mm	COM CABO
70-410-210NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL BAIONETA NON-STICK ULTRASEAL PT 1,0MM	1,00 mm	210 mm	COM CABO
70-410-230NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL BAIONETA NON-STICK ULTRASEAL PT 1,0MM	1,00 mm	230 mm	COM CABO
70-415-160NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL BAIONETA NON-STICK ULTRASEAL PT 1,5MM	1,50 mm	160 mm	COM CABO
70-415-180NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL BAIONETA NON-STICK ULTRASEAL PT 1,5MM	1,50 mm	180 mm	COM CABO
70-415-210NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL BAIONETA NON-STICK ULTRASEAL PT 1,5MM	1,50 mm	210 mm	COM CABO

70-415-230NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL BAIONETA NON-STICK ULTRASEAL PT 1.5MM	1,50 mm	230 mm	COM CABO
70-420-160NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL BAIONETA NON-STICK ULTRASEAL PT 2.0MM	2,00 mm	160 mm	COM CABO
70-420-180NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL BAIONETA NON-STICK ULTRASEAL PT 2.0MM	2,00 mm	180 mm	COM CABO
70-420-210NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL BAIONETA NON-STICK ULTRASEAL PT 2.0MM	2,00 mm	210 mm	COM CABO
70-420-230NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL BAIONETA NON-STICK ULTRASEAL PT 2.0MM	2,00 mm	230 mm	COM CABO

Pinça Descartável Bipolar Lang – Plug Europeu



Código	Descrição	Tamanho		Característica
		Diâmetro Ø	Comprimento	
70-405-160	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 0,5MM	0,5 mm	160 mm	N.A.
70-405-180	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 0,5MM	0,5 mm	180 mm	N.A.
70-405-210	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 0,5MM	0,5 mm	210 mm	N.A.
70-405-230	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 0,5MM	0,5 mm	230 mm	N.A.
70-407-160	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 0,7MM	0,7 mm	160 mm	N.A.
70-407-180	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 0,7MM	0,7 mm	180 mm	N.A.
70-407-210	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 0,7MM	0,7 mm	210 mm	N.A.
70-407-230	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 0,7MM	0,7 mm	230 mm	N.A.
70-410-160	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 1,0MM	1,0 mm	160 mm	N.A.
70-410-180	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 1,0MM	1,0 mm	180 mm	N.A.
70-410-210	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 1,0MM	1,0 mm	210 mm	N.A.
70-410-230	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 1,0MM	1,0 mm	230 mm	N.A.
70-415-160	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 1,5MM	1,5 mm	160 mm	N.A.
70-415-180	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 1,5MM	1,5 mm	180 mm	N.A.
70-415-210	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 1,5MM	1,5 mm	210 mm	N.A.
70-415-230	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 1,5MM	1,5 mm	230 mm	N.A.
70-420-160	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 2,0MM	2,0 mm	160 mm	N.A.
70-420-180	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 2,0MM	2,0 mm	180 mm	N.A.
70-420-210	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 2,0MM	2,0 mm	210 mm	N.A.
70-420-230	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 2,0MM	2,0 mm	230 mm	N.A.
70-405-160NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA NON-STICK PT 0,5MM	0,5 mm	160 mm	N.A.
70-405-180NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA NON-STICK PT 0,5MM	0,5 mm	180 mm	N.A.
70-405-210NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA NON-STICK PT 0,5MM	0,5 mm	210 mm	N.A.
70-405-230NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA NON-STICK PT 0,5MM	0,5 mm	230 mm	N.A.
70-407-160NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA NON STICK PT 0,7MM	0,7 mm	160 mm	N.A.
70-407-180NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA NON STICK PT 0,7MM	0,7 mm	180 mm	N.A.
70-407-210NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA NON STICK PT 0,7MM	0,7 mm	210 mm	N.A.
70-407-230NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA NON STICK PT 0,7MM	0,7 mm	230 mm	N.A.
70-410-160NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA NON STICK PT 1,0MM	1,0 mm	160 mm	N.A.
70-410-180NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA NON STICK PT 1,0MM	1,0 mm	180 mm	N.A.
70-410-210NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA NON STICK	1,0 mm	210 mm	N.A.

	PT 1,0MM			
70-410-230NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA NON STICK PT 1,0MM	1,0 mm	230 mm	N.A.
70-415-160NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA NON STICK PT 1,5MM	1,5 mm	160 mm	N.A.
70-415-180NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA NON STICK PT 1,5MM	1,5 mm	180 mm	N.A.
70-415-210NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA NON STICK PT 1,5MM	1,5 mm	210 mm	N.A.
70-415-230NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA NON STICK PT 1,5MM	1,5 mm	230 mm	N.A.
70-420-160NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA NON STICK PT 2,0MM	2,0 mm	160 mm	N.A.
70-420-180NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA NON STICK PT 2,0MM	2,0 mm	180 mm	N.A.
70-420-210NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA NON STICK PT 2,0MM	2,0 mm	210 mm	N.A.
70-420-230NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA NON STICK PT 2,0MM	2,0 mm	230 mm	N.A.

Pinça Descartável Bipolar Lang – Plug Europeu – Com Irrigação



Código	Descrição	Tamanho		Característica
		Diâmetro Ø	Comprimento	
70-405-160IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 0.5MM	0,5 mm	160 mm	Com Irrigação
70-405-180IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 0.5MM	0,5 mm	180 mm	Com Irrigação
70-405-210IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 0.5MM	0,5 mm	210 mm	Com Irrigação
70-405-230IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 0.5MM	0,5 mm	230 mm	Com Irrigação
70-407-160IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 0.7MM	0,7 mm	160 mm	Com Irrigação
70-407-180IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 0.7MM	0,7 mm	180 mm	Com Irrigação
70-407-210IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 0.7MM	0,7 mm	210 mm	Com Irrigação
70-407-230IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 0.7MM	0,7 mm	230 mm	Com Irrigação
70-410-160IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 1,0MM	1,0 mm	160 mm	Com Irrigação
70-410-180IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 1,0MM	1,0 mm	180 mm	Com Irrigação
70-410-210IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 1,0MM	1,0 mm	210 mm	Com Irrigação
70-410-230IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 1,0MM	1,0 mm	230 mm	Com Irrigação
70-415-160IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 1,5MM	1,5 mm	160 mm	Com Irrigação
70-415-180IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 1,5MM	1,5 mm	180 mm	Com Irrigação
70-415-210IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 1,5MM	1,5 mm	210 mm	Com Irrigação
70-415-230IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 1,5MM	1,5 mm	230 mm	Com Irrigação
70-420-160IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 2,0MM	2,0 mm	160 mm	Com Irrigação
70-420-180IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 2,0MM	2,0 mm	180 mm	Com Irrigação
70-420-210IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 2,0MM	2,0 mm	210 mm	Com Irrigação
70-420-230IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU BAIONETA PT 2,0MM	2,0 mm	230 mm	Com Irrigação

Pinça Descartável Bipolar Lang – Plug EUA



Código	Descrição	Tamanho	Característica
--------	-----------	---------	----------------

		Diâmetro Ø	Comprimento	
70-205-316	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 0.5MM	0,5 mm	316 mm	N.A.
70-205-318	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 0.5MM	0,5 mm	318 mm	N.A.
70-205-321	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 0.5MM	0,5 mm	321 mm	N.A.
70-205-323	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 0.5MM	0,5 mm	323 mm	N.A.
70-207-316	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 0.7MM	0,7 mm	316 mm	N.A.
70-207-318	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 0.7MM	0,7 mm	318 mm	N.A.
70-207-321	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 0.7MM	0,7 mm	321 mm	N.A.
70-207-323	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 0.7MM	0,7 mm	323 mm	N.A.
70-210-316	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 1.0MM	1,0 mm	316 mm	N.A.
70-210-318	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 1.0MM	1,0 mm	318 mm	N.A.
70-210-321	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 1.0MM	1,0 mm	321 mm	N.A.
70-210-323	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 1.0MM	1,0 mm	323 mm	N.A.
70-215-316	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 1.5MM	1,5 mm	316 mm	N.A.
70-215-318	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 1.5MM	1,5 mm	318 mm	N.A.
70-215-321	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 1.5MM	1,5 mm	321 mm	N.A.
70-215-323	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 1.5MM	1,5 mm	323 mm	N.A.
70-220-316	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 2.0MM	2,0 mm	316 mm	N.A.
70-220-318	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 2.0MM	2,0 mm	318 mm	N.A.
70-220-321	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 2.0MM	2,0 mm	321 mm	N.A.
70-220-323	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 2.0MM	2,0 mm	323 mm	N.A.

Pinça Descartável Bipolar Lang – Plug EUA – Com Cabo



Código	Descrição	Tamanho		Característica
		Diâmetro Ø	Comprimento	
70-205-516HS	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 0.5MM	0,5 mm	316 mm	Com Cabo
70-205-518HS	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 0.5MM	0,5 mm	318 mm	Com Cabo
70-205-521HS	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 0.5MM	0,5 mm	321 mm	Com Cabo
70-205-523HS	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 0.5MM	0,5 mm	323 mm	Com Cabo
70-207-516HS	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 0.7MM	0,7 mm	316 mm	Com Cabo
70-207-518HS	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 0.7MM	0,7 mm	318 mm	Com Cabo
70-207-521HS	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 0.7MM	0,7 mm	321 mm	Com Cabo
70-207-523HS	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 0.7MM	0,7 mm	323 mm	Com Cabo
70-210-516HS	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 1.0MM	1,0 mm	316 mm	Com Cabo
70-210-518HS	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 1.0MM	1,0 mm	318 mm	Com Cabo
70-210-521HS	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 1.0MM	1,0 mm	321 mm	Com Cabo
70-210-523HS	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 1.0MM	1,0 mm	323 mm	Com Cabo
70-215-516HS	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 1.5MM	1,5 mm	316 mm	Com Cabo
70-215-518HS	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 1.5MM	1,5 mm	318 mm	Com Cabo
70-215-521HS	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 1.5MM	1,5 mm	321 mm	Com Cabo
70-215-523HS	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 1.5MM	1,5 mm	323 mm	Com Cabo
70-220-516HS	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 2.0MM	2,0 mm	316 mm	Com Cabo
70-220-518HS	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 2.0MM	2,0 mm	318 mm	Com Cabo
70-220-521HS	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 2.0MM	2,0 mm	321 mm	Com Cabo


70-220-523HS	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 2.0MM	2,0 mm	323 mm	Com Cabo
--------------	-----------------------------------	--------	--------	----------

Pinça Descartável Bipolar Lang – Plug EUA – Com Irrigação



Código	Descrição	Tamanho		Característica
		Diâmetro Ø	Comprimento	
70-205-316IR	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 0.5MM	0,5 mm	316 mm	Com Irrigação
70-205-318IR	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 0.5MM	0,5 mm	318 mm	Com Irrigação
70-205-321IR	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 0.5MM	0,5 mm	321 mm	Com Irrigação
70-205-323IR	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 0.5MM	0,5 mm	323 mm	Com Irrigação
70-207-316IR	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 0.7MM	0,7 mm	316 mm	Com Irrigação
70-207-318IR	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 0.7MM	0,7 mm	318 mm	Com Irrigação
70-207-321IR	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 0.7MM	0,7 mm	321 mm	Com Irrigação
70-207-323IR	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 0.7MM	0,7 mm	323 mm	Com Irrigação
70-210-316IR	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 1.0MM	1,0 mm	316 mm	Com Irrigação
70-210-318IR	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 1.0MM	1,0 mm	318 mm	Com Irrigação
70-210-321IR	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 1.0MM	1,0 mm	321 mm	Com Irrigação
70-210-323IR	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 1.0MM	1,0 mm	323 mm	Com Irrigação
70-215-316IR	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 1.5MM	1,5 mm	316 mm	Com Irrigação
70-215-318IR	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 1.5MM	1,5 mm	318 mm	Com Irrigação
70-215-321IR	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 1.5MM	1,5 mm	321 mm	Com Irrigação
70-215-323IR	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 1.5MM	1,5 mm	323 mm	Com Irrigação
70-220-316IR	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 2.0MM	2,0 mm	316 mm	Com Irrigação
70-220-318IR	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 2.0MM	2,0 mm	318 mm	Com Irrigação
70-220-321IR	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 2.0MM	2,0 mm	321 mm	Com Irrigação
70-220-323IR	BIPOLAR US PLUG BAIONETA PT 2.0MM	2,0 mm	323 mm	Com Irrigação

Pinça Descartável Bipolar Lang – Plug Universal ENNE

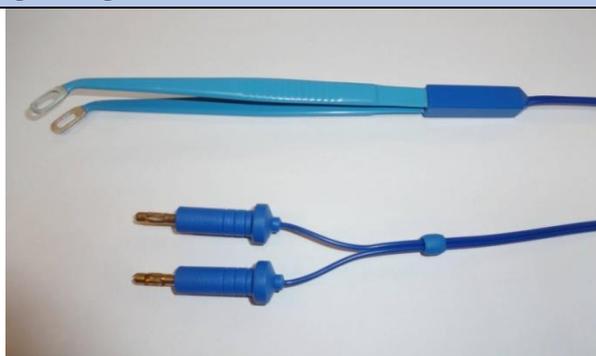

Código	Descrição	Tamanho		Característica
		Diâmetro Ø	Comprimento	
70-110-160NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL ANGULADA NON STICK ENNE 160MM	0,5 mm	160 mm	Com Cabo
70-110-180NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL ANGULADA NON STICK ENNE 180MM	0,5 mm	180 mm	Com Cabo
70-110-210NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL ANGULADA NON STICK ENNE 210MM	0,5 mm	210 mm	Com Cabo
70-110-230NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL ANGULADA NON STICK ENNE 230MM	0,5 mm	230 mm	Com Cabo

Pinça Descartável Bipolar Lang – Plug Universal



Código	Descrição	Tamanho		Característica
		Diâmetro Ø	Comprimento	
70-505-160NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL RETA NON-STICK ULTRASEAL PT 0,5MM	0,5 mm	160 mm	COM CABO
70-505-180NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL RETA NON-STICK ULTRASEAL PT 0,5MM	0,5 mm	180 mm	COM CABO
70-505-210NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL RETA NON-STICK ULTRASEAL PT 0,5MM	0,5 mm	210 mm	COM CABO
70-505-230NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL RETA NON-STICK ULTRASEAL PT 0,5MM	0,5 mm	230 mm	COM CABO
70-507-160NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL RETA NON-STICK ULTRA POINT PT 0,7MM	0,7 mm	160 mm	COM CABO
70-507-180NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL RETA NON-STICK ULTRASEAL PT 0,7MM	0,7 mm	180 mm	COM CABO
70-507-210NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL RETA NON-STICK ULTRASEAL PT 0,7MM	0,7 mm	210 mm	COM CABO
70-507-230NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL RETA NON-STICK ULTRASEAL PT 0,7MM	0,7 mm	230 mm	COM CABO
70-510-160NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL RETA NON-STICK ULTRASEAL PT 1,0MM	1,00 mm	160 mm	COM CABO
70-510-180NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL RETA NON-STICK ULTRASEAL PT 1,0MM	1,00 mm	180 mm	COM CABO
70-510-210NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL RETA NON-STICK ULTRASEAL PT 1,0MM	1,00 mm	210 mm	COM CABO
70-510-230NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL RETA NON-STICK ULTRASEAL PT 1,0MM	1,00 mm	230 mm	COM CABO
70-515-160NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL RETA NON-STICK ULTRASEAL PT 1.5MM	1,50 mm	160 mm	COM CABO
70-515-180NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL RETA NON-STICK ULTRASEAL PT 1.5MM	1,50 mm	180 mm	COM CABO
70-515-210NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL RETA NON-STICK ULTRASEAL PT 1.5MM	1,50 mm	210 mm	COM CABO
70-515-230NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL RETA NON-STICK ULTRASEAL PT 1.5MM	1,50 mm	230 mm	COM CABO
70-520-160NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL RETA NON-STICK ULTRASEAL PT 2.0MM	2,00 mm	160 mm	COM CABO
70-520-180NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL RETA NON-STICK ULTRASEAL PT 2.0MM	2,00 mm	180 mm	COM CABO
70-520-210NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL RETA NON-STICK ULTRASEAL PT 2.0MM	2,00 mm	210 mm	COM CABO
70-520-230NS	BIPOLAR PLUG UNIVERSAL RETA NON-STICK ULTRASEAL PT 2.0MM	2,00 mm	230 mm	COM CABO

Pinça Descartável Bipolar Lang – Plug Europeu



Código	Descrição	Tamanho		Característica
		Diâmetro Ø	Comprimento	
70-505-160	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 0,5MM	0,5 mm	160 mm	N.A.

70-05-180	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 0,5MM	0,5 mm	180 mm	N.A.
70-505-210	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 0,5MM	0,5 mm	210 mm	N.A.
70-505-230	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 0,5MM	0,5 mm	230 mm	N.A.
70-507-160	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 0,7MM	0,7 mm	160 mm	N.A.
70-507-180	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 0,7MM	0,7 mm	180 mm	N.A.
70-507-210	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 0,7MM	0,7 mm	210 mm	N.A.
70-507-230	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 0,7MM	0,7 mm	230 mm	N.A.
70-510-160	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 1,0MM	1,0 mm	160 mm	N.A.
70-510-180	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 1,0MM	1,0 mm	180 mm	N.A.
70-510-210	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 1,0MM	1,0 mm	210 mm	N.A.
70-510-230	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 1,0MM	1,0 mm	230 mm	N.A.
70-515-160	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 1,5MM	1,5 mm	160 mm	N.A.
70-515-180	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 1,5MM	1,5 mm	180 mm	N.A.
70-515-210	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 1,5MM	1,5 mm	210 mm	N.A.
70-515-230	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 1,5MM	1,5 mm	230 mm	N.A.
70-520-160	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 2,0MM	2,0 mm	160 mm	N.A.
70-520-180	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 2,0MM	2,0 mm	180 mm	N.A.
70-520-210	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 2,0MM	2,0 mm	210 mm	N.A.
70-520-230	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 2,0MM	2,0 mm	230 mm	N.A.
70-505-160NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA NON-STICK PT 0,5MM	0,5 mm	160 mm	N.A.
70-505-180NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA NON-STICK PT 0,5MM	0,5 mm	180 mm	N.A.
70-505-210NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA NON-STICK PT 0,5MM	0,5 mm	210 mm	N.A.
70-505-230NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA NON-STICK PT 0,5MM	0,5 mm	230 mm	N.A.
70-507-160NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA NON STICK PT 0,7MM	0,7 mm	160 mm	N.A.
70-507-180NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA NON STICK PT 0,7MM	0,7 mm	180 mm	N.A.
70-507-210NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA NON STICK PT 0,7MM	0,7 mm	210 mm	N.A.
70-507-230NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA NON STICK PT 0,7MM	0,7 mm	230 mm	N.A.
70-510-160NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA NON STICK PT 1,0MM	1,0 mm	160 mm	N.A.
70-510-180NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA NON STICK PT 1,0MM	1,0 mm	180 mm	N.A.
70-510-210NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA NON STICK PT 1,0MM	1,0 mm	210 mm	N.A.
70-510-230NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA NON STICK PT 1,0MM	1,0 mm	230 mm	N.A.
70-515-160NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA NON STICK PT 1,5MM	1,5 mm	160 mm	N.A.
70-515-180NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA NON STICK PT 1,5MM	1,5 mm	180 mm	N.A.
70-515-210NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA NON STICK PT 1,5MM	1,5 mm	210 mm	N.A.
70-515-230NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA NON STICK PT 1,5MM	1,5 mm	230 mm	N.A.
70-520-160NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA NON STICK PT 2,0MM	2,0 mm	160 mm	N.A.
70-520-180NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA NON STICK PT 2,0MM	2,0 mm	180 mm	N.A.
70-520-210NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA NON STICK PT 2,0MM	2,0 mm	210 mm	N.A.
70-520-230NS	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA NON STICK PT 2,0MM	2,0 mm	230 mm	N.A.
Pinça Descartável Bipolar Lang – Plug Europeu – Com Irrigação				



Código	Descrição	Tamanho		Característica
		Diâmetro Ø	Comprimento	
70-505-160IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 0.5MM	0,5 mm	160 mm	Com Irrigação
70-505-180IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 0.5MM	0,5 mm	180 mm	Com Irrigação
70-505-210IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 0.5MM	0,5 mm	210 mm	Com Irrigação
70-505-230IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 0.5MM	0,5 mm	230 mm	Com Irrigação
70-507-160IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 0.7MM	0,7 mm	160 mm	Com Irrigação
70-507-180IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 0.7MM	0,7 mm	180 mm	Com Irrigação
70-507-210IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 0.7MM	0,7 mm	210 mm	Com Irrigação
70-507-230IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 0.7MM	0,7 mm	230 mm	Com Irrigação
70-510-160IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 1,0MM	1,0 mm	160 mm	Com Irrigação
70-510-180IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 1,0MM	1,0 mm	180 mm	Com Irrigação
70-510-210IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 1,0MM	1,0 mm	210 mm	Com Irrigação
70-510-230IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 1,0MM	1,0 mm	230 mm	Com Irrigação
70-515-160IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 1,5MM	1,5 mm	160 mm	Com Irrigação
70-515-180IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 1,5MM	1,5 mm	180 mm	Com Irrigação
70-515-210IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 1,5MM	1,5 mm	210 mm	Com Irrigação
70-515-230IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 1,5MM	1,5 mm	230 mm	Com Irrigação
70-520-160IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 2,0MM	2,0 mm	160 mm	Com Irrigação
70-520-180IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 2,0MM	2,0 mm	180 mm	Com Irrigação
70-520-210IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 2,0MM	2,0 mm	210 mm	Com Irrigação
70-520-230IR	BIPOLAR PLUG EUROPEU RETA PT 2,0MM	2,0 mm	230 mm	Com Irrigação

Pinça Descartável Bipolar Lang – Plug EUA



Código	Descrição	Tamanho		Característica
		Diâmetro Ø	Comprimento	
70-505-316	BIPOLAR US PLUG RETA PT 0.5MM	0,5 mm	316 mm	N.A.
70-505-318	BIPOLAR US PLUG RETA PT 0.5MM	0,5 mm	318 mm	N.A.
70-505-321	BIPOLAR US PLUG RETA PT 0.5MM	0,5 mm	321 mm	N.A.
70-505-323	BIPOLAR US PLUG RETA PT 0.5MM	0,5 mm	323 mm	N.A.
70-507-316	BIPOLAR US PLUG RETA PT 0.7MM	0,7 mm	316 mm	N.A.
70-507-318	BIPOLAR US PLUG RETA PT 0.7MM	0,7 mm	318 mm	N.A.
70-507-321	BIPOLAR US PLUG RETA PT 0.7MM	0,7 mm	321 mm	N.A.
70-507-323	BIPOLAR US PLUG RETA PT 0.7MM	0,7 mm	323 mm	N.A.
70-510-316	BIPOLAR US PLUG RETA PT 1.0MM	1,0 mm	316 mm	N.A.
70-510-318	BIPOLAR US PLUG RETA PT 1.0MM	1,0 mm	318 mm	N.A.
70-510-321	BIPOLAR US PLUG RETA PT 1.0MM	1,0 mm	321 mm	N.A.
70-510-323	BIPOLAR US PLUG RETA PT 1.0MM	1,0 mm	323 mm	N.A.
70-515-316	BIPOLAR US PLUG RETA PT 1.5MM	1,5 mm	316 mm	N.A.

70-515-318	BIPOLAR US PLUG RETA PT 1.5MM	1,5 mm	318 mm	N.A.
70-515-321	BIPOLAR US PLUG RETA PT 1.5MM	1,5 mm	321 mm	N.A.
70-515-323	BIPOLAR US PLUG RETA PT 1.5MM	1,5 mm	323 mm	N.A.
70-520-316	BIPOLAR US PLUG RETA PT 2.0MM	2,0 mm	316 mm	N.A.
70-520-318	BIPOLAR US PLUG RETA PT 2.0MM	2,0 mm	318 mm	N.A.
70-520-321	BIPOLAR US PLUG RETA PT 2.0MM	2,0 mm	321 mm	N.A.
70-520-323	BIPOLAR US PLUG RETA PT 2.0MM	2,0 mm	323 mm	N.A.

Pinça Descartável Bipolar Lang – Plug EUA – Com Cabo



Código	Descrição	Tamanho		Característica
		Diâmetro Ø	Comprimento	
70-505-516HS	BIPOLAR US PLUG RETA PT 0.5MM	0,5 mm	316 mm	Com Cabo
70-505-518HS	BIPOLAR US PLUG RETA PT 0.5MM	0,5 mm	318 mm	Com Cabo
70-505-521HS	BIPOLAR US PLUG RETA PT 0.5MM	0,5 mm	321 mm	Com Cabo
70-505-523HS	BIPOLAR US PLUG RETA PT 0.5MM	0,5 mm	323 mm	Com Cabo
70-507-516HS	BIPOLAR US PLUG RETA PT 0.7MM	0,7 mm	316 mm	Com Cabo
70-507-518HS	BIPOLAR US PLUG RETA PT 0.7MM	0,7 mm	318 mm	Com Cabo
70-507-521HS	BIPOLAR US PLUG RETA PT 0.7MM	0,7 mm	321 mm	Com Cabo
70-507-523HS	BIPOLAR US PLUG RETA PT 0.7MM	0,7 mm	323 mm	Com Cabo
70-510-516HS	BIPOLAR US PLUG RETA PT 1.0MM	1,0 mm	316 mm	Com Cabo
70-510-518HS	BIPOLAR US PLUG RETA PT 1.0MM	1,0 mm	318 mm	Com Cabo
70-510-521HS	BIPOLAR US PLUG RETA PT 1.0MM	1,0 mm	321 mm	Com Cabo
70-510-523HS	BIPOLAR US PLUG RETA PT 1.0MM	1,0 mm	323 mm	Com Cabo
70-515-516HS	BIPOLAR US PLUG RETA PT 1.5MM	1,5 mm	316 mm	Com Cabo
70-515-518HS	BIPOLAR US PLUG RETA PT 1.5MM	1,5 mm	318 mm	Com Cabo
70-515-521HS	BIPOLAR US PLUG RETA PT 1.5MM	1,5 mm	321 mm	Com Cabo
70-515-523HS	BIPOLAR US PLUG RETA PT 1.5MM	1,5 mm	323 mm	Com Cabo
70-520-516HS	BIPOLAR US PLUG RETA PT 2.0MM	2,0 mm	316 mm	Com Cabo
70-520-518HS	BIPOLAR US PLUG RETA PT 2.0MM	2,0 mm	318 mm	Com Cabo
70-520-521HS	BIPOLAR US PLUG RETA PT 2.0MM	2,0 mm	321 mm	Com Cabo
70-520-523HS	BIPOLAR US PLUG RETA PT 2.0MM	2,0 mm	323 mm	Com Cabo

Pinça Descartável Bipolar Lang – Plug EUA – Com Irrigação



Código	Descrição	Tamanho		Característica
		Diâmetro Ø	Comprimento	
70-505-316IR	BIPOLAR US PLUG RETA PT 0.5MM	0,5 mm	316 mm	Com Irrigação
70-505-318IR	BIPOLAR US PLUG RETA PT 0.5MM	0,5 mm	318 mm	Com Irrigação
70-505-321IR	BIPOLAR US PLUG RETA PT 0.5MM	0,5 mm	321 mm	Com Irrigação
70-505-323IR	BIPOLAR US PLUG RETA PT 0.5MM	0,5 mm	323 mm	Com Irrigação

70-507-316IR	BIPOLAR US PLUG RETA PT 0.7MM	0,7 mm	316 mm	Com Irrigação
70-507-318IR	BIPOLAR US PLUG RETA PT 0.7MM	0,7 mm	318 mm	Com Irrigação
70-507-321IR	BIPOLAR US PLUG RETA PT 0.7MM	0,7 mm	321 mm	Com Irrigação
70-507-323IR	BIPOLAR US PLUG RETA PT 0.7MM	0,7 mm	323 mm	Com Irrigação
70-510-316IR	BIPOLAR US PLUG RETA PT 1.0MM	1,0 mm	316 mm	Com Irrigação
70-510-318IR	BIPOLAR US PLUG RETA PT 1.0MM	1,0 mm	318 mm	Com Irrigação
70-510-321IR	BIPOLAR US PLUG RETA PT 1.0MM	1,0 mm	321 mm	Com Irrigação
70-510-323IR	BIPOLAR US PLUG RETA PT 1.0MM	1,0 mm	323 mm	Com Irrigação
70-515-316IR	BIPOLAR US PLUG RETA PT 1.5MM	1,5 mm	316 mm	Com Irrigação
70-515-318IR	BIPOLAR US PLUG RETA PT 1.5MM	1,5 mm	318 mm	Com Irrigação
70-515-321IR	BIPOLAR US PLUG RETA PT 1.5MM	1,5 mm	321 mm	Com Irrigação
70-515-323IR	BIPOLAR US PLUG RETA PT 1.5MM	1,5 mm	323 mm	Com Irrigação
70-520-316IR	BIPOLAR US PLUG RETA PT 2.0MM	2,0 mm	316 mm	Com Irrigação
70-520-318IR	BIPOLAR US PLUG RETA PT 2.0MM	2,0 mm	318 mm	Com Irrigação
70-520-321IR	BIPOLAR US PLUG RETA PT 2.0MM	2,0 mm	321 mm	Com Irrigação
70-520-323IR	BIPOLAR US PLUG RETA PT 2.0MM	2,0 mm	323 mm	Com Irrigação

2. FABRICANTE

Razão Social	Lang Eletro Medicina Ltda. - ME
CNPJ	31.600471/0001-64
Fone / Fax	+55 (21) 2745 6307 / +55 (21) 3539-0660
Endereço Fábrica	Rua: Joaquim Vieira Filho, 562 – Japuíba 2º Distrito de Cachoeiras de Macacu, Estado do Rio de Janeiro CEP: 28685-000
Website	www.lang.com.br

3. INDICAÇÕES

As pinças LANG, feitas com material de alta resistência, aço 420 e revestido com nylon 10, são indicadas para cauterização, coagulação, prensão e manipulação de tecido durante procedimentos de cirurgia geral, neurocirurgia, cirurgia otorrinolaringológica, cirurgia obstétrica ou ginecológica e cirurgia maxilofacial ou plástica.

Feitas com material de alta resistência, aço 420 e revestido com nylon 10.

4. PRECAUÇÕES

Inspecione cuidadosamente a embalagem esterilizada das pontas; não utilize caso:

- A embalagem e/ou o selo estejam danificados;
- Os componentes pareçam estar danificados;
- O prazo de validade tenha expirado;

5. AS PINÇAS SÃO DE USO ÚNICO – NÃO REUTILIZE.

A reesterilização das pinças por qualquer método poderá causar falhas de funcionamento, que podem provocar lesões no paciente.

Não os utilize caso tenham sido reesterilizadas por qualquer método.

- Utilize uma técnica asséptica durante todas as fases de manuseio do produto;
- Não utilize as pinças LANG com definições de potência do gerador de tensão que excedam tensão RF pico-a-pico de 800V

Os valores máximos de potência permitidos são os seguintes:

- Coagulação: 150 unidades Malis (50 Watts) = 800 V

➤ Corte: 90 unidades Malis (80 Watts) = 800 V
Sempre consulte o manual do usuário para determinar os valores máximos de potência permitidos.

6. ESTERILIZAÇÃO

Este produto destina-se a UMA ÚNICA UTILIZAÇÃO; NÃO REESTERILIZE.

A LANG não se responsabiliza por qualquer produto que tenha sido reesterilizado, nem serão aceitos para crédito ou troca quaisquer produtos que tenham sido abertos, ainda que não utilizados.

- Esterilizado em Oxido de Etileno

7. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ATENÇÃO: Manuseie a extremidade de trabalho das pontas com cuidado, pois as mesmas são muito afiadas e podem causar lesões.

ATENÇÃO: Certifique-se de que o gerador está desligado (ou está em modo de espera) antes conectar as pinças. Não forneça energia ao eletrodo durante a montagem, caso contrário poderá ocorrer lesões no utilizador.

1. Retire a pinça esterilizada. Deixe o tubo de proteção nas pontas para proteger as mãos e as luvas.
2. Retire os tubos de proteção das pontas.
3. Feche a pinça e verifique o alinhamento da ponta
4. Conecte a pinça ao cabo
5. Conecte o cabo ao gerador.

8. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Os valores máximos de potência permitidos são os seguintes:

Corte: 80W

Coagulação: 60W

NOTA:

A PINÇA DESCARTÁVEL BIPOLAR LANG foi desenvolvido para a perfeita compatibilidade com a família de Unidade Eletrocirúrgica LBS da LANG ELETRO MEDICINA, registrado junto à ANVISA sob nº 80123900040.

O uso das PINÇA DESCARTÁVEL BIPOLAR LANG com outros equipamentos não compatíveis pode comprometer sua funcionalidade.

9. DESCARTE

Descarte o eletrodo de acordo com as diretivas hospitalares relativas a materiais afiados com potenciais riscos biológicos.

10. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O instrumental cirúrgico deve ser armazenado de forma a manter sua configuração, seu acabamento de superfície e não danificar sua embalagem. Na estocagem o instrumental deve atender às seguintes exigências: o instrumental estéril deve estar em sua embalagem original; deve ser armazenado em local seco e longe da umidade e do calor direto (temperatura entre 20 e 25 C e umidade relativa do ar entre 30 e 50 %) e não deve ser estocada junto com produtos químicos que possam desprender vapores corrosivos. O transporte e manuseio devem ser realizados de forma a impedir dano ou alteração nas suas características. Deve-se manipular o instrumental cirúrgico cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou quedas.

11. GARANTIA DO EQUIPAMENTO

A **Lang Eletro Medicina Ltda. - ME**, garante aos seus clientes usuários originais, que os equipamentos de sua fabricação são produzidos dentro da mais avançada técnica e com rigoroso controle de qualidade, assegurando dentro das condições e prazos abaixo, um perfeito funcionamento dos mesmos.

1. DOS EQUIPAMENTOS

1.1 Esta garantia é válida para todos os equipamentos da marca LANG®.

2. DA INSTALAÇÃO E DO USO

2.1 A instalação e/ou operação dos equipamentos, bem como, as condições de trabalho, devem atender às especificações da LANG® constantes nas Instruções de Uso. Diferentes condições das indicadas invalidam as cláusulas de Garantia deste Termo.

3. DA GARANTIA

3.1 A garantia, sem qualquer ônus ao usuário adquirente, é limitada à substituição e/ou conserto de eventuais peças defeituosas ou à correção de qualquer defeito de produção, mediante constatação do nosso Departamento de Assistência Técnica.

3.2 A substituição e/ou conserto referido no item anterior não se aplica às peças com desgaste natural de uso, bem como, por imperícias ou negligências na utilização do equipamento, ou ainda, que tenham sido consertadas ou modificadas por pessoas não credenciadas pela LANG®.

3.3 Em nenhuma hipótese, caso ocorra à necessidade de substituição de qualquer componente coberto por este Termo, o período de garantia original será dilatado pelo acréscimo de eventuais suplementares do componente substituído.

4. DO LOCAL DA GARANTIA

4.1 O reparo e/ou substituição de peças será realizado por técnico da LANG®, ou credenciado pela mesma.

4.2 Quando constatado que um perfeito reparo do equipamento só será possível em nossas instalações (fábrica), ou nas empresas por nós autorizadas, o frete do transporte (ida e volta) correrá por conta do adquirente usuário.

5. DOS PRAZOS

5.1 Inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal de venda da LANG® ou seus revendedores, pelo prazo de 12 meses.

6. DA RESPONSABILIDADE

6.1 Esta garantia é válida somente para o equipamento que estiver em uso e na posse do adquirente usuário original

6.2 A responsabilidade da LANG® é limitada à substituição e/ou reparo dos componentes, excetuando-se da garantia eventuais prejuízos por lucros cessantes ou pela indenização de quaisquer outros danos indiretos ou imediatos.

OBS.: A presente garantia só é válida juntamente com a Nota Fiscal

12. TERMO DE RESPONSABILIDADE

A empresa **Lang Eletro Medicina Ltda. - ME**, representada por seu Responsável Técnico Cristina da Costa Amorim e por seu Representante Legal Thais Lang Arruda Rodrigues, assumem a responsabilidade técnica e legal pelo produto e que toda a informação prestada referente ao produto ELETRODO BIPOLAR DESCARTÁVEL ENDOFLEX LANG®, contidas nestas Instruções de Uso, são verdadeiras.